

Masque barrière

(tissé par Les Tissages de Charlieu) 

Dans le contexte de crise sanitaire majeure, le Département a souhaité préparer la suite en accompagnant ses habitants après le déconfinement. L'objectif du Département est simple : fournir progressivement à chaque habitant jusqu'à 3 masques réutilisables.

Ces masques - découpés et gaufrés par les volontaires mobilisés pour les ateliers organisés à l'Hôtel du Département - qui ne se substituent pas aux masques normalisés, répondent à la spécification de l'AFNOR S76-001 et rentrent dans la catégorie III définie par l'État.

Composition : 51% Polyester, 48% Coton, 1% Élasthanne.

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN *préconisées par le fabricant*

-  • Laver à 60°C cycle court (≥ 30 min), dans un filet à linge, à part de tout autre linge, avec détergent classique avant le premier usage et après chaque utilisation (dès qu'il est retiré ou bien au bout de 4h d'utilisation continue maximum). Essorage à 1200 tr/min, passage à la vapeur (110°C max) si nécessaire une fois sec.
-  • Laisser sécher à l'air, à plat ou suspendu, ou en étuve. Étirer le masque encore humide dans les 2 sens pour lui redonner ses dimensions initiales en sortie de machine à laver.
-  • Se laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant chaque manipulation du masque.
-  • Si les attaches sont douloureuses derrière les oreilles, un morceau de coton peut s'intercaler pour limiter les frottements.

**Durée de vie prévue du masque : entre 5 et 10 utilisations
(c'est à dire 5 à 10 lavages).**



LE MASQUE N'EXONÈRE PAS DES GESTES BARRIÈRES.



Se laver très régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter



Saluer sans se serrer la main éviter les embrassades